


	<p style="text-align: center;">Ziółkowski Juventas S.K.A.  Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce, Polska  tel/fax.: +48 13 463 80 35  kom. +48 608074052  mail: biuro@juventas.pl  www.juventas.pl</p>																																																																																													
	<p style="text-align: center;"><b>Instrukcja używania wyrobu medycznego  Osprzęt do kabin rehabilitacyjnych</b></p>																																																																																													
	<p>Model</p>	<p>Opis</p> <p>OSPP P Osprzęt podstawowy do kabiny PUR</p> <p>OSPP Osprzęt podstawowy do kabiny UGL1/UGL2</p> <p>OSPS Osprzęt standardowy do kabiny UGL1/UGL2</p> <p>OSPŁ Osprzęt pełny do kabiny UGL1/UGL2</p>																																																																																												
<p style="text-align: center;"><i>Dokładna specyfikacja techniczna dostępna na stronie <a href="http://www.juventas.pl">www.juventas.pl</a></i></p>																																																																																														
<p><b>Przeznaczenie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osprzęt umożliwiający wykonywanie kompleksowych ćwiczeń w dedykowanych kabinach rehabilitacyjnych</li> <li>• Wyrób jest dedykowany dla profesjonalnego operatora</li> </ul>																																																																																													
<p><b>Zawartość zestawu</b></p>	<p>Model</p>	<p>Zawartość</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td rowspan="28" style="text-align: center; vertical-align: middle;">OSPP P</td><td>Podwieszka miednicy</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka pod głowę</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka ud i ramion</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka dwustawowa</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Linka L-700</td><td style="text-align: right;">4 szt.</td></tr> <tr><td>Linka L-1200</td><td style="text-align: right;">4 szt.</td></tr> <tr><td>Linka L-1800</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Linka L-2450</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Linka L-3000</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Linka L-3750</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Pętla Glissona</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Orczyk do pętli Glissona</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Pas do stabilizacji ud</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Opaska na udo 545x130</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Opaska na przedramię 265x78</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Kamaszek skórzany</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Uchwyt na linkę</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Uchwyt z taśmą</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 0,5 kg</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 1 kg</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 2 kg</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 3 kg</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Błoczek rehabilitacyjny</td><td style="text-align: right;">4 szt.</td></tr> <tr><td>Esik</td><td style="text-align: right;">10 szt.</td></tr> <tr><td>Karabińczyk</td><td style="text-align: right;">12 szt.</td></tr> <tr><td rowspan="18" style="text-align: center; vertical-align: middle;">OSPP</td><td>Linka dł. 1600 mm</td><td style="text-align: right;">8szt.</td></tr> <tr><td>Linka dł. 960 mm</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Linka dł. 2450 mm</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Linka dł. 5720 mm</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Linka dł. 3750 mm</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka przedr. i podudzi 420x100</td><td style="text-align: right;">4 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka ud i ramion 540x135</td><td style="text-align: right;">4 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka pod miednicę 830x230</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka klatki piersiowej 820x300</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka pod głowę 150x530</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka stóp 75x610</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135)</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Pas do wyciągu za miednicę 1330x170</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Kamaszek 135x170</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 0,5 kg</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 1,0 kg</td><td style="text-align: right;">2 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 1,5 kg</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 2,0 kg</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 2,5 kg</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> <tr><td>Ciężarek miękki 3,0 kg</td><td style="text-align: right;">1 szt.</td></tr> </table>	OSPP P	Podwieszka miednicy	1 szt.	Podwieszka pod głowę	1 szt.	Podwieszka ud i ramion	2 szt.	Podwieszka dwustawowa	2 szt.	Linka L-700	4 szt.	Linka L-1200	4 szt.	Linka L-1800	1 szt.	Linka L-2450	1 szt.	Linka L-3000	1 szt.	Linka L-3750	1 szt.	Pętla Glissona	1 szt.	Orczyk do pętli Glissona	1 szt.	Pas do stabilizacji ud	1 szt.	Opaska na udo 545x130	1 szt.	Opaska na przedramię 265x78	1 szt.	Kamaszek skórzany	1 szt.	Uchwyt na linkę	1 szt.	Uchwyt z taśmą	2 szt.	Ciężarek miękki 0,5 kg	1 szt.	Ciężarek miękki 1 kg	1 szt.	Ciężarek miękki 2 kg	1 szt.	Ciężarek miękki 3 kg	1 szt.	Błoczek rehabilitacyjny	4 szt.	Esik	10 szt.	Karabińczyk	12 szt.	OSPP	Linka dł. 1600 mm	8szt.	Linka dł. 960 mm	2 szt.	Linka dł. 2450 mm	1 szt.	Linka dł. 5720 mm	1 szt.	Linka dł. 3750 mm	2 szt.	Podwieszka przedr. i podudzi 420x100	4 szt.	Podwieszka ud i ramion 540x135	4 szt.	Podwieszka pod miednicę 830x230	1 szt.	Podwieszka klatki piersiowej 820x300	1 szt.	Podwieszka pod głowę 150x530	1 szt.	Podwieszka stóp 75x610	2 szt.	Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135)	2 szt.	Pas do wyciągu za miednicę 1330x170	1 szt.	Kamaszek 135x170	1 szt.	Ciężarek miękki 0,5 kg	2 szt.	Ciężarek miękki 1,0 kg	2 szt.	Ciężarek miękki 1,5 kg	1 szt.	Ciężarek miękki 2,0 kg	1 szt.	Ciężarek miękki 2,5 kg	1 szt.	Ciężarek miękki 3,0 kg	1 szt.
OSPP P	Podwieszka miednicy	1 szt.																																																																																												
	Podwieszka pod głowę	1 szt.																																																																																												
	Podwieszka ud i ramion	2 szt.																																																																																												
	Podwieszka dwustawowa	2 szt.																																																																																												
	Linka L-700	4 szt.																																																																																												
	Linka L-1200	4 szt.																																																																																												
	Linka L-1800	1 szt.																																																																																												
	Linka L-2450	1 szt.																																																																																												
	Linka L-3000	1 szt.																																																																																												
	Linka L-3750	1 szt.																																																																																												
	Pętla Glissona	1 szt.																																																																																												
	Orczyk do pętli Glissona	1 szt.																																																																																												
	Pas do stabilizacji ud	1 szt.																																																																																												
	Opaska na udo 545x130	1 szt.																																																																																												
	Opaska na przedramię 265x78	1 szt.																																																																																												
	Kamaszek skórzany	1 szt.																																																																																												
	Uchwyt na linkę	1 szt.																																																																																												
	Uchwyt z taśmą	2 szt.																																																																																												
	Ciężarek miękki 0,5 kg	1 szt.																																																																																												
	Ciężarek miękki 1 kg	1 szt.																																																																																												
	Ciężarek miękki 2 kg	1 szt.																																																																																												
	Ciężarek miękki 3 kg	1 szt.																																																																																												
	Błoczek rehabilitacyjny	4 szt.																																																																																												
	Esik	10 szt.																																																																																												
	Karabińczyk	12 szt.																																																																																												
	OSPP	Linka dł. 1600 mm		8szt.																																																																																										
		Linka dł. 960 mm		2 szt.																																																																																										
		Linka dł. 2450 mm	1 szt.																																																																																											
Linka dł. 5720 mm		1 szt.																																																																																												
Linka dł. 3750 mm		2 szt.																																																																																												
Podwieszka przedr. i podudzi 420x100		4 szt.																																																																																												
Podwieszka ud i ramion 540x135		4 szt.																																																																																												
Podwieszka pod miednicę 830x230		1 szt.																																																																																												
Podwieszka klatki piersiowej 820x300		1 szt.																																																																																												
Podwieszka pod głowę 150x530		1 szt.																																																																																												
Podwieszka stóp 75x610		2 szt.																																																																																												
Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135)		2 szt.																																																																																												
Pas do wyciągu za miednicę 1330x170		1 szt.																																																																																												
Kamaszek 135x170		1 szt.																																																																																												
Ciężarek miękki 0,5 kg		2 szt.																																																																																												
Ciężarek miękki 1,0 kg		2 szt.																																																																																												
Ciężarek miękki 1,5 kg		1 szt.																																																																																												
Ciężarek miękki 2,0 kg		1 szt.																																																																																												
Ciężarek miękki 2,5 kg	1 szt.																																																																																													
Ciężarek miękki 3,0 kg	1 szt.																																																																																													

		Esik	30 szt.
	OSPS	Linka dł. 1600 mm	8szt.
		Linka dł. 960 mm	6 szt.
		Linka dł. 2450 mm	1 szt.
		Linka dł. 5720 mm	1 szt.
		Linka dł. 3750 mm	3 szt.
		Podwieszka przedr. i podudzi 420x100	4 szt.
		Podwieszka ud i ramion 540x135	4 szt.
		Podwieszka pod miednicę 830x230	2 szt.
		Podwieszka klatki piersiowej 820x300	1 szt.
		Podwieszka pod głowę 150x530	1 szt.
		Podwieszka stóp 75x610	4 szt.
		Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135)	4 szt.
		Pas do wyciągu za miednicę 1330x170	1 szt.
		Kamaszek 135x170	1 szt.
		Ciężarek miękki 0,5 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 1,0 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 1,5 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 2,0 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 2,5 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 3,0 kg	1 szt.
		Esik	30 szt.
	OSPŁ	Linka dł. 1600 mm	14 szt.
		Linka dł. 960 mm	6 szt.
		Linka dł. 2450 mm	1 szt.
		Linka dł. 5720 mm	1 szt.
		Linka dł. 3750 mm	3 szt.
		Podwieszka przedr. i podudzi 420x100	6 szt.
		Podwieszka ud i ramion 540x135	6 szt.
		Podwieszka pod miednicę 830x230	2 szt.
		Podwieszka klatki piersiowej 820x300	1 szt.
		Podwieszka pod głowę 150x530	1 szt.
		Podwieszka stóp 75x610	4 szt.
		Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135)	4 szt.
		Pas do wyciągu za miednicę 1330x170	1 szt.
		Kamaszek 135x170	2 szt.
		Ciężarek miękki 0,5 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 1,0 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 1,5 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 2,0 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 2,5 kg	2 szt.
		Ciężarek miękki 3,0 kg	1 szt.
		Ciężarek miękki 4,0 kg	1 szt.
		Esik	60 szt.
		Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej (Pelota 210x448 3 paski 30x1130)	1 szt.
		Pas do stabilizacji klatki piersiowej (Pelota 118x300 pas 40x1080)	1 szt.
	Pas do stabilizacji podudzia (Pelota 100x120 pas 40x1320)	2 szt.	
	Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia (pelota 100x120 2 paski 40x365)	2 szt.	
	Pas do stabilizacji ud (Pelota 118x300 2 paski 30x1100)	1 szt.	
	Pętla Glissona z orczykiem	1 szt.	
<b>Montaż i obsługa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Osprzęt przymocować w sposób stabilny do kabiny uniemożliwiający odpięcie się w trakcie ćwiczeń.</li> </ul>		
<b>Wskazania do stosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Należy wykonywać tylko i wyłącznie zabiegi/ ćwiczenia zlecone przez lekarza/fizjoterapeutę</li> </ul>		
<b>Przeciwwskazania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zgodnie z przeciwwskazaniami zdefiniowanymi przez lekarza/fizjoterapeutę</li> </ul>		
<b>Dezynfekcja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W celu uniknięcia zakażenia skóry pacjenta, przed przystąpieniem do zabiegów, należy zdezynfekować wyrób.</li> <li>W celu dezynfekcji należy stosować środki dedykowane do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych.</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Przed zastosowaniem środka należy zapoznać się z instrukcją jego stosowania.</li> </ul>
<b>Konserwacja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyrób medyczny można myć wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu.</li> <li>• Nie wolno stosować środków zawierających wolny tlen oraz chlor.</li> </ul>
<b>Przeglądy serwisowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyroby należy poddawać okresowym – dwu letnim przeglądom wykonywanym przez serwis producenta.</li> </ul>
<b>Czas życia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czas życia wyrobu wynosi 15 lat od daty zakupu pod warunkiem okresowych przeglądów serwisowych.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabronione jest używanie niesprawnego, uszkodzonego wyrobu.</li> <li>• Zabronione jest stosowanie wyposażenia, które nie jest dedykowane do stosowania wraz z wyrobem.</li> <li>• W trakcie zabiegów nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru.</li> <li>• Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.</li> </ul>
<b>Wersja wydania 01_05.2024</b>	