

GermiProtect GP4x95P

przepływowy sterylizator powietrza - mobilna lampa UV-C dużych kubatur



Polski producent
Polski serwis techniczny



Darmowa dostawa
na terenie Polski




Deklaracja zgodności
Oznakowanie CE



100 - 200 m²
250 - 500 m³



260 m³/h

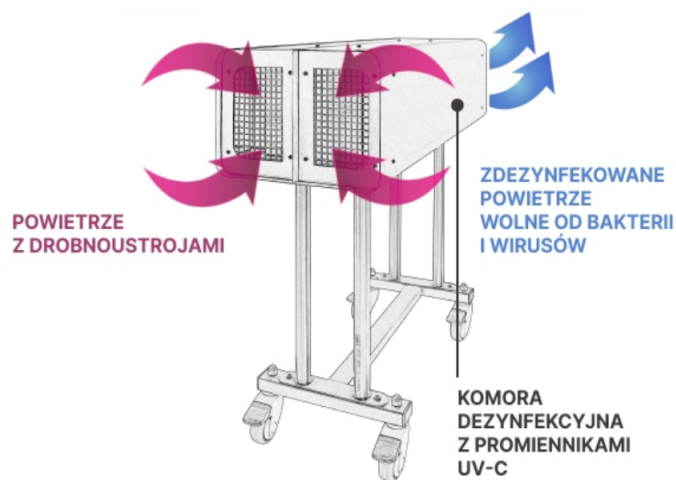

Przepływowy sterylizator powietrza GP4x95P to w zasadzie przejezdna, 2-komorowa lampa UV-C dużych kubatur do dezynfekcji powietrza w pomieszczeniu, w którym wymagany jest wysoki stopień czystości mikrobiologicznej powietrza. Skutecznie eliminuje unoszące się w powietrzu drobnoustroje, takie jak grzyby, pleśnie, wirusy i bakterie. Wyposażona jest w cztery promienniki o mocy 95W (łącznie 390W) emitujące wysokoenergetyczne promieniowanie krótkofalowe UV-C o długości fali 257,3 nm. Promienniki zabudowane są w wykonanej ze stali nierdzewnej przepływowej komorze dezynfekcyjnej z wymuszonym przez wentylator obiegiem powietrza, dzięki czemu przepływowy sterylizator powietrza może być załączany podczas pobytu ludzi i zwierząt w pomieszczeniu celem permanentnej dezynfekcji powietrza nawet przez całą dobę.

Steryliizator powietrza GermiProtect GP4x95P osadzony jest na statywie wykonanym ze stali nierdzewnej z podstawą wyposażoną w 4 kółka kierunkowe z oponkami do twardych podłoży. Wszystkie kółka posiadają hamulec (blokadę jazdy). Wyposażony jest w przewód zasilający z wtyczką do sieci elektrycznej 230V.

W placówkach ochrony zdrowia przepływowe sterylizatory powietrza dużych kubatur służą utrzymywaniu higieny powietrza w dużych pomieszczeniach placówki, w których zwykle lampy bakteriobójcze byłyby niewystarczające, eliminując obecne w powietrzu drobnoustroje, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego pacjentów i personelu tej placówki. W klinikach i szpitalach przepływowe i wydajne sterylizatory powietrza dużych kubatur są stosowane przede wszystkim na salach operacyjnych.

Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu - PRODUCENT

ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j.
ul. Stępowizna 34; 95-100 Zgierz
42 717 11 76 | biuro@ultraviol.pl



Autoryzowany dystrybutor producenta

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym



Email: sklep@epicmed.pl

<https://epicmed.pl/>

32 720 94 11

Rodzaj lampy UV-C	przepływową mobilną
Model lampy (seria)	GermiProtect
Moc i liczba promienników UV-C	390W [4x95W]
Skuteczność w pomieszczeniu	do 200 m ² [500 m ³]
Wydajność wentylatora	260 m ³ /h
Żywotność promienników UV-C	9000 godzin pracy
Licznik czasu pracy promienników	bez licznika
Sygnalizacja wymiany promienników	akustyczna
Pilot zdalnego sterowania	Nie
Przewód zasilający lamę UV-C	3 m z wtyczką do gniazda typu E
Wydajność dezynfekcji powietrza	100-200 m ³ /h
Typ promienników UV-C	PL-L TUV95W lub HNS-L 95W
Producent promienników UV-C	Philips lub OSRAM
Długość promienników UV-C [mm]	894,60 mm
Długość fali promieniowania UV-C	253,7 nm
Poziom emisji ozonu przez promienniki	zerowy - nie wytwarzają fal o długości 185nm odpowiedzialnych za powstawanie ozonu
Poziom hałasu lampy UV-C	max 40 dB
Zasilanie sieciowe lampy	AC 230 V 50 Hz
Pobór mocy	280W
Klasa zabezpieczenia lampy	I klasa
Klasa szczelności obudowy lampy	IP20
Długość kopuły [cm]	94
Szerokość kopuły [cm]	35
Wysokość kopuły [cm]	29
Waga kopuły lampy [kg]	20,5
Wysokość statywu [cm]	61
Waga statywu [kg]	8,9
Długość całkowita lampy [cm]	94
Szerokość całkowita lampy [cm]	35
Wysokość całkowita lampy [cm]	90
Waga całkowita lampy [kg]	29,4
Numer katalogowy produktu	GP4x95P
Kod PKWiU	26.60.13.0
Kod CN	9018 20 00
Certyfikacja produktu	CE

Dokument certyfikacji produktu	deklaracja zgodności
Stawka podatku VAT na produkt	23%
Gwarancja ogólna	1 rok
Gwarant udzielający gwarancji	producent wyrobu / produktu
Rodzaj przesyłki z produktem	przesyłka standardowa (paczka, koperta, foliopak)
Liczba paczek w przesyłce	2
Waga przesyłki z opakowaniem [kg]	31
Producent wyrobu	[35] ULTRA-VIOL Pietras Purgal Wójcik sp.j. ☐ ul. Sępowizna34; 95-100 Zgierz [Polska] ☎ 42 717 11 76 @ biuro@ultraviol.pl
Serwis techniczny w Polsce	fabryczny producenta
Serwis techniczny - kontakt	☎ 42 715 02 16 @ reklamacje@ultraviol.pl
Podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu	producent (dane powyżej)

Biuro handlowe sklepu

EpicMED sklep ze sprzętem i wyposażeniem medycznym
 Infolinia.: **32 720 94 11** (konsultaci, zamówienia telefoniczne)
 GSM/SMS: **533 99 22 01**
 Faks: **32 720 94 16** (czynny całą dobę)
 E-mail: sklep@epicmed.pl
<https://epicmed.pl>

Zamówienia online można składać 24h 7 dni w tygodniu.
 Realizujemy zamówienia z odroczonej terminem płatności 7 lub 14 dni po dostawie towaru dla placówek i instytucji sektora finansów publicznych.

Opis wyrobu medycznego wraz z informacjami technicznymi przedstawionymi na tej stronie produktu jest przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników (personel medyczny, służby zaopatrzeniowe placówek ochrony zdrowia, etc.) i **nie stanowi reklamy** kierowanej do publicznej wiadomości w rozumieniu art. 55 ustawy o wyrobach medycznych, ale rzetelną informację o produkcie należną potencjalnemu jego nabywcy przed zakupem.

Zastrzeżenia dotyczące dokumentu

Informacje zamieszczone w dokumencie były aktualne w momencie jego opublikowania. Data publikacji w nazwie pliku PDF.
 Informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne informacje o produkcie zamieszczonym w dokumencie znajdują się na stronie produktu w sklepie, do której prowadzi link (adres URL) zamieszczony w nagłówku dokumentu.
 Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych produktów.
 Prezentowane w dokumencie zdjęcia i grafiki są ilustracją poglądową i mogą nie stanowić przedmiotu oferty.
 © Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. - wszelkie prawa zastrzeżone.

Operator sklepu EpicMED.pl

Dom Kupiecki Arkadia sp. z o.o.
 ul. Staromiejska 6/10d
 40-013 Katowice
 NIP 9542784362
 NIP UE: PL9542784362
 REGON 368734116
 KRS 0000703242
 Identyfikator celny: ID SISC/EORI PL954278436200000
 e-Doręczenia - adres skrzynki: AE:PL-74906-72708-IJSUG-24