

Lampa bakteriobójcza NBV-30S

Charakterystyka i zalety lampy

- skuteczna dezynfekcja powierzchni podczas nieobecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu bez stosowania środków chemicznych
- skutecznie oczyszcza powierzchnie z bakterii, wirusów, grzybów i innych drobnoustrojów w pomieszczeniach o powierzchni do 15 m² i kubaturze do 45 m³
- 1 promiennik UV-C o mocy 30W
- natężenie promieniowania UV-C 2,3W/m² powierzchni (z odległości 1m)
- regulacja kąta naświetlania w zakresie 230° poprzez nachylenie kopuły z odbłyśnikiem
- promiennik foliowany (opcja dodatkowa) spełnia wymagania norm higienicznych systemu HACCP oraz zabezpiecza przez rozbrzyżem szkła i skażeniami w przypadku stłuczenia promiennika
- duża żywotność promiennika 8000h - przy pracy 12h na dobę wymiana co ok. 670 dni
- niezbędna do zachowania czystości mikrobiologicznej pomieszczeń
- niezastąpiona w placówkach ochrony zdrowia, np. na salach zabiegowych, czy w brudownikach
- polecana także do placówek weterynaryjnych
- estetyczna obudowa
- prosta i szybka wymiana promiennika
- energooszczędna - niskie koszty eksploatacji
- przeznaczona do montażu na suficie
- darmowa dostawa na terenie Polski



Bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV-C jest szkodliwe dla człowieka i zwierząt!


Załączanie lampy bakteriobójczej bezpośredniego działania dopuszczalne jest tylko, gdy w pomieszczeniu nie znajdują się ludzie i zwierzęta. Lampa oznakowana jest widocznym i czytelnym napisem ostrzegawczym „UWAGA! Promieniowanie UV-C - chronić oczy i skórę”.

[zobacz produkt w sklepie](#) | [sprawdź aktualną cenę](#)

Dane techniczne

Kraj producenta: Polska
 Gwarancja ogólna: 1 rok
 Gwarancja - gwarant: gwarantem jest producent wyrobu
 Serwis: fabryczny producenta
 Nr katalogowy wyrobu u producenta: NBV 30 S
 Typ lampy UV-C wg montażu: sufitowa
 Moc i liczba promienników UV-C: 30W [1x30W]
 Skuteczność na powierzchni: do 15 m²
 Licznik czasu pracy promienników: bez licznika
 Typ promienników: UV-C TUV G13 894,60 mm
 Żywotność promienników: 8.000 h
 Sygnalizacja wymiany promienników: akustyczna
 Natężenie promieniowania UV-C: 2,3 W/m² (z odległości 1m)
 Długość fali promieniowania UV-C: 253,7 nm
 Regulacja kąta naświetlania: 230°
 Powłoka odbłyśnika lampy: wysokogatunkowe aluminium o charakterystyce zbliżonej do lustra
 Zasilanie sieciowe lampy: AC | 230 V | 50 Hz
 Pobór mocy przez lampę: 33W [40 VA]
 Klasa zabezpieczenia lampy: I klasa
 Klasa szczelności obudowy lampy: IP20
 Długość wysięgnika [cm]: 50
 Wysokość całkowita [cm]: 64
 Długość kopuły [cm]: 96
 Szerokość kopuły [cm]: 8,5
 Wysokość kopuły [cm]: 13,5
 Waga lampy [kg]: 7
 Typ licznika czasu pracy promienników: bez licznika

12 - 15 m²

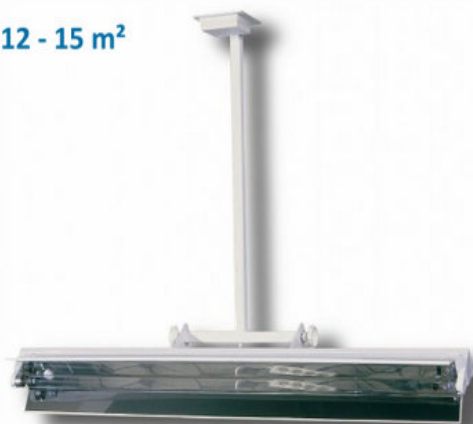

2,3 W/m²

SPRZEDAWCA



EpicMED sklep online

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym

E-mail: sklep@epicmed.pl Internet: epicmed.pl

Telefon: 32 720 94 11 GSM/SMS: 533 99 22 01

Faks 32 720 94 16