

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MAT AIREX

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu marki Airex. By jak najdłużej cieszyć się korzyściami płynącymi z użytkowania specjalistycznej pianki Airex, spełniającej standardy oznakowania CE, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

### Czyszczenie

Brudne maty mogą być czyszczone ciepłą wodą z mydłem lub domowym detergentem, np. płynem do prania, przy użyciu miękkiej szczotki.

Mimo, że pranie w pralce jest możliwe, sposób ten nie jest zalecany ze względów praktycznych. Jeśli nie innej możliwości wyczyszczenia maty, należy wybrać delikatny program prania nieprzekraczający temperatury 45°C używając standardowych środków do prania. Benzyna ekstrakcyjna, alkohol, czy różnego rodzaju odplamiacze, nigdy nie powinny być stosowane do czyszczenia mat.

### Dezynfekcja

Generalnie, dzięki obecności specjalnej powłoki antybakteryjnej, maty nie wymagają stosowania dodatkowych środków dezynfekcyjnych. Jednakże, jeśli dezynfekcja jest konieczna ze względu na specjalne wymagania higieniczne, należy skorzystać z jednego z popularnych detergentów dezynfekcyjnych (np. Merfen, Descogen, Kohrsolin FF, Terralin). Dezynfekowanie przy użyciu gorącej pary nie jest dopuszczalne.

### Przechowywanie

Pojedyncze maty można łatwo zwinąć i przechować zapinając je przy pomocy specjalnych pasków Airex, które można nabyć u dystrybutora wraz z matą.

Większą ilość mat najlepiej przechowywać w pozycji leżącej (na płasko).

Maty można też przechowywać w swobodnym zwisie (pionowo) na specjalnie do tego przeznaczonych stojakach lub wieszakach. Stojaki i wieszaki można nabyć u dystrybutorów Airex.

W przypadku, gdy maty nie będą używane dłuższy czas, powinny być przechowywane w suchych, nie ogrzewanych pomieszczeniach.

### Używanie w łaźniach, saunach, na basenach i na zewnątrz budynków

Gdy maty są używane w wyjątkowo ciepłych i wilgotnych miejscach (np. łaźnie publiczne, pokoje kąpielowe, ośrodki SPA, itp.), w celu zapewnienia jak najdłuższej żywotności mat Airex, powinny one być regularnie opłukiwane wodą i suszone na powietrzu w stanie rozwiniętym. Podobnie rzecz ma się, gdy używamy maty na wilgotnej łące, czy na plaży.

W terenie otwartym, jak też w pomieszczeniach, nie należy maty ekspozować na działanie promieni słonecznych, zwłaszcza w upalne dni.

Zasadniczo maty odporne są na oleje roślinne i smary, ale niektóre olejki i emulsje do opalania lub przeciwsłoneczne mogą delikatnie oddziaływać na powierzchnię maty, a tym samym skrócić ich żywotność. W takich przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowego nakrycia maty, np. ręcznika kąpielowego.

Maty Airex są odporne na działanie standardowych środków chemicznych i bakteriobójczych stosowanych na basenach (chlor, podchloryn, ozon, itp.). Zaleca się opłukanie maty i pozostawienie jej do wyschnięcia po każdym użyciu – również ze względów higienicznych.

### Maty gimnastyczne i rehabilitacyjne Airex są:

- ✓ bezpieczne
- ✓ komfortowe i przyjazne dla skóry
- ✓ higieniczne
- ✓ proste w obsłudze
- ✓ produkowane w sposób ekologiczny

### SPRZEDAWCA

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>EpicMED</b> - sprzęt i wyposażeniem medyczne<br>Obsługa Klienta: tel. 32 720 94 11<br>sklep@epicmed.pl   www.epicmed.pl   |  |
|  | Podmiot odpowiedzialny:<br><b>Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o.</b><br>ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice<br>NIP 9542784362   REGON 368734116   KRS 0000703242<br>Tel. 32 720 94 00 www.dkarkadia.pl   dk@dkarkadia.pl |  |