




<b>Przeciwwskazania do stosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonywanie zabiegów w stosunku do pacjentek o wadze większej niż określone przez producenta maksymalne obciążenie fotela</li> </ul>
<b>Dezynfekcja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W celu uniknięcia zakażenia skóry pacjenta, przed przystąpieniem do zabiegów, należy zdezynfekować fotel.</li> <li>Do tapicerki skóropodobnej (Standard Line) zaleca się stosowanie preparatu typu Glukoprotamina lub alkohol izopropylowy max. stężenie 70 %. Do dezynfekcji tapicerki winylowej (Exclusive Line) zaleca się stosowanie preparatów typu: Antibac, Brial, Desomed Rapid, FD 360, FD 366, Kohrsolin, Meliseptol Foam Pure, Mikrozid lub ściereczek Cleanisept.</li> </ul>
<b>Czyszczenie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyrób medyczny można czyścić lekko wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu.</li> <li>Nie wolno stosować środków zawierających wolny tlen oraz chlor – może to spowodować uszkodzenie tapicerki oraz powłok lakierniczych</li> </ul>
<b>Obsługa bieżąca</b>	<p><b>Raz na kwartał.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzanie sprężyn gazowych. Należy skontrolować poprawność działania siłowników przez ich oględziny. Stwierdzenie osłabienia w działaniu oraz wszelkie wycieki należy bezzwłocznie zgłaszać do firmy JUVENTAS.</li> </ul> <p><b>Obsługa raz na pół roku.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzanie połączeń ruchomych. Wszystkie połączenia ruchome należy przesmarowywać raz na pół roku lub w momencie wystąpienia głośnych odgłosów w czasie ich pracy. Jako środek zalecamy stosowanie dostępnych na rynku preparatów smarujących.</li> <li>Sprawdzanie połączeń śrubowych. Należy skontrolować poprawność połączeń śrubowych i w razie potrzeby usuwać pojawiające się luzy. W przypadku braku takiej możliwości należy ten fakt bezzwłocznie zgłaszać do firmy JUVENTAS.</li> <li>Sprawdzenie przewodów zasilających oraz sygnałowych Należy sprawdzić stan izolacji przewodów. Wszelkie uszkodzenia, przetarcia należy zgłaszać do producenta. W takim przypadku wymagane jest zaniechanie pracy fotela.</li> </ul> <p><b>Okresowe badania bezpieczeństwa elektrycznego.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nie rzadziej niż raz na 2 lata i każdorazowo po każdej awarii/naprawie elementów elektrycznych fotela należy wykonać przegląd fotela pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego.</li> </ul>
<b>Przeglądy serwisowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyroby należy poddawać okresowym – dwu letnim przeglądom wykonywanym przez serwis producenta</li> </ul>
<b>Czas życia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Czas życia wyrobu wynosi 15 lat od daty zakupu po warunkiem okresowych przeglądów serwisowych</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyrób musi być podłączony do sieci zasilającej 230 V 50 Hz wyposażonej w zabezpieczenie różnicowo prądowe,</li> <li>Wszystkie zabiegi muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel,</li> <li>Zabronione jest używanie niesprawnego, uszkodzonego fotela,</li> <li>Należy wypoziomować i ustabilizować fotel przed rozpoczęciem zabiegów,</li> <li>Należy przeprowadzać dezynfekcję fotela przed zabiegiem u każdego pacjenta,</li> <li>Należy asekurować pacjenta podczas wejścia i zejścia z fotela,</li> <li>Przed regulacją fotela, sprawdzić czy pacjent nie położył rąk w pobliżu regulowanych mechanizmów,</li> <li>Zabronione jest schodzenia z fotela przy uniesionym blacie,</li> <li>Zabronione jest pozostawianie pacjenta na fotelu bez opieki,</li> <li>Zabronione jest przemieszczanie fotela wraz z pacjentem,</li> <li>Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych obciążeń,</li> <li>Zabronione jest otwieranie siłowników, sprężyn gazowych oraz innych elementów mechanicznych stołu,</li> <li>Czas pracy ciągłej siłowników elektrycznych 2min, po których musi nastąpić 18 min przerwy. Przy krótszej pracy siłownika nie jest wymagana przerwa,</li> <li>Zabronione jest siadanie na podgłówniku, oraz krawędziach fotela.</li> </ul>
<b>Skróty nazw wyposażenia dodatkowego</b>	<p>K Koła jezdne z hamulcem  UR Uchwyty rąk  W70 Wieszak na papier 70 cm  SK Stojak do kroplówek  PPS Podpórki pod stopy  PN Pilot nożny</p>