

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MAT Mambo Max

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu marki MVS in Motion. By jak najdłużej cieszyć się korzyściami płynącymi z użytkowania specjalistycznej pianki, spełniającej standardy oznakowania CE, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją.

### Czyszczenie

Brudne maty mogą być czyszczone ciepłą wodą z mydłem lub domowym detergentem, np. płynem do prania, przy użyciu miękkiej szczotki lub szorstkiej gąbki.

Mimo, że pranie w pralce jest możliwe, sposób ten nie jest zalecany ze względów praktycznych. Jeśli nie ma innej możliwości wyczyszczenia maty, należy wybrać delikatny program prania nieprzekraczający temperatury 30°C używając standardowych środków do prania. Benzyna ekstrakcyjna, alkohol, czy różnego rodzaju odplamiacze, nigdy nie powinny być stosowane do czyszczenia mat.

### Dezynfekcja

Jeśli dezynfekcja jest konieczna ze względu na specjalne wymagania higieniczne, należy skorzystać z jednego z popularnych detergentów dezynfekcyjnych (np. Merfen, Descogen, Kohrsolin FF, Terralin). Dezynfekowanie przy użyciu gorącej pary nie jest dopuszczalne.

### Przechowywanie

Pojedyncze maty można łatwo zwinąć i przechować zapinając je przy pomocy paska dostarczonego wraz z matą.

Większą ilość mat najlepiej przechowywać w pozycji leżącej (na płasko).

Maty można też przechowywać w swobodnym zwisie (pionowo) na specjalnie do tego przeznaczonych stojakach lub wieszakach.

Stojaki i wieszaki można nabyć u dystrybutorów MVS in Motion.

W przypadku, gdy maty nie będą używane dłuższy czas, powinny być przechowywane w suchych, nie ogrzewanych pomieszczeniach.

### Używanie w łaźniach, saunach, na basenach i na zewnątrz budynków

Gdy maty są używane w wyjątkowo ciepłych i wilgotnych miejscach (np. łaźnie publiczne, pokoje kąpielowe, ośrodki SPA, itp.), w celu zapewnienia jak najdłuższej żywotności mat, powinny one być regularnie opłukiwane wodą i suszone na powietrzu w stanie rozwiniętym. Podobnie rzecz ma się, gdy używamy maty na wilgotnej łące, czy na plaży. W terenie otwartym, jak też w pomieszczeniach, nie należy maty ekspozować na działanie promieni słonecznych, zwłaszcza w upalne dni.



Zasadniczo maty odporne są na oleje roślinne i smary, ale niektóre olejki i emulsje do opalania lub przeciwsłoneczne mogą delikatnie oddziaływać na powierzchnię maty, a tym samym skrócić ich żywotność. W takich przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowego nakrycia maty, np. ręcznika kąpielowego.

Maty są odporne na działanie standardowych środków chemicznych i bakteriobójczych stosowanych na basenach (chlor, podchloryn, ozon, itp.). Zaleca się opłukanie maty i pozostawienie jej do wyschnięcia po każdym użyciu – również ze względów higienicznych.

### Maty gimnastyczne Mambo Max są:

- ✓ bezpieczne
- ✓ komfortowe
- ✓ higieniczne
- ✓ proste w obsłudze

### SPRZEDAWCA

	<b>EpicMED</b> - sprzęt i wyposażeniem medyczne Obsługa Klienta: tel. 32 720 94 11 sklep@epicmed.pl   www.epicmed.pl	 <b>ARKADIA</b> DOM KUPIECKI spółka z o.o.
	Podmiot odpowiedzialny: <b>Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o.</b> ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice NIP 9542784362   REGON 368734116   KRS 0000703242 Tel. 32 720 94 00 www.dkarkadia.pl   dk@dkarkadia.pl	