



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Materac przeciwoodleżynowy



JANPOL
FABRYKA MATERACY

Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o.
43-180 Orzesze, ul. Cynkowa 2a



1. Przewidziane zastosowanie

Materac przeciwoodleżynowy przeznaczony jest dla osób obłożnie chorych i o ograniczonych możliwościach ruchowych, u których poprzez długotrwałe leżenie w bezruchu tworzą się odleżyny.

Materac przeciwoodleżynowy, dzięki specjalnemu sposobowi wycięć tworzących bezdotykowe strefy z poduszkami powietrza, zmniejsza wielkość kontaktu ciała z materacem, a tym samym zmniejsza możliwości powstawania odleżyn. Drugim niezwykle istotnym czynnikiem powodującym powstawanie odleżyn jest wilgoć. Dlatego też w wersji podstawowej zastosowano pokrowiec paro-przepuszczalny. Takie rozwiązanie wkładu w połączeniu z pokrowcem paroprzepuszczalnym gwarantuje wysokie zabezpieczenie przed odleżynami.

Przeznaczenie podstawowe – sprzęt rehabilitacji leczniczej w użytku domowym i szpitalnym

2. Zalecenia użytkowe

Po dostarczeniu materaca należy go odpakować z folii celem przewietrzenia. Specyficzny zapach może utrzymywać się przez kilka dni, w tym czasie należy wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się materac.

Materac jest przeznaczony do leżenia i musi znajdować się na łóżku odpowiednio do niego dostosowanym. Długość i szerokość ramy łóżka muszą odpowiadać wymiarowi materaca. Niedopuszczalne jest ułożenie wyrobu bezpośrednio na podłodze czy powierzchni pozbawionej otworów ze względu na brak odpowiedniej wentylacji.

Materac zalecany jest do stelaży regulowanych mechanicznie lub elektrycznie, co dodatkowo poprawia komfort spania i obsługę osób obłożnie chorych.

Materac użytkować wyłącznie od strony górnej z charakterystycznymi nacięciami wyczuwalnymi dotykowo. Dodatkowo strona ta oznaczona jest etykietą „Materac jednostronny. Na tej stronie śpij!!!”. Strona dolna nie ma właściwości przeciwoodleżynowych.

Pokrowiec paroprzepuszczalny zatrzymuje po stronie zewn. płyny fizjologiczne. W przypadku zalania należy je możliwie szybko usunąć. Pozostawienie ich może powodować dodatkowe infekcje i pogorszenie zdrowia chorego. Zabrudzony pokrowiec prać i dezynfekować zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt.4.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zaprzestać używania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

UWAGA! Materac przeciwoodleżynowy zmniejsza możliwość, ale nie wyklucza w 100% powstawania odleżyn, ponieważ organizm każdego pacjenta jest inny pod względem odporności na odleżyny.

3. Przeciwwskazania do stosowania

Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

4. Przechowywanie i konserwacja

Materac należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem.



Wyrób należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i nadmiernego kurzu (wilgotność: 40-70%, temperatura: 10 - 30°C).

Procedurę prania pokrowca należy przeprowadzić zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce. Poniżej objaśnienia zastosowanych symboli:



- prać w temp. do 95 st. C



- suszenie bębnowe przy normalnych obrotach



- prasować w temp. do 150 st.C



- zakaz wybielania



- czyścić w czterochloroetylenie lub benzynie

Materac nadaje się do mycia i dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej. Nie należy stosować środków zawierających chlor, amoniak, dimetyloformamid, nadtlenki, które mogą uszkodzić powłokę poliuretanową. Tkanina nie jest również odporna na działanie olejów, tłuszczu, światła UV. Przed zastosowaniem środka czyszczącego/dezynfekującego należy wykonać uprzednio test na małej powierzchni. Przykładowe środki dezynfekujące, które można stosować: Meliseptol rapid, Bacillol AF, Incidin Liquid Spray.

5. Skład surowcowy

Ze względu na możliwość nietypowych uczuleń podajemy skład surowcowy materaca:

- poliuretan, poliester (skład tkaniny obiciowej)
- pianka poliuretanowa (skład wkładu materaca).