



Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania wyrobu, należy skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Materac szpitalny



JANPOL
FABRYKA MATERACY

Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o.
43-180 Orzesze, ul. Cynkowa 2a



1. Przewidziane zastosowanie

Materac szpitalny charakteryzuje się wysoką sprężystością z jednoczesną możliwością zginania w łózkach z podnoszonym zagłówkiem.

Materac o typowej długości 2 m w pełni spełnia swoje zadania dla osób o wzroście od 1,6 – 1,9 m. Osoby o innym wzroście winny stosować łóżka i materace dostosowane do ich wzrostu.

Zastosowana pianka poliuretanowa o gęstości w zakresie 25-55 kg/m³ o gr. 6-20 cm w sposób wystarczający zapewnia odpowiedni komfort spania.

Przewidziane zastosowanie – zapewnienie warunków higienicznych pacjentom leżącym w szpitalu.

2. Zalecenia użytkowe

Po dostarczeniu materaca należy go odpakować z folii celem przewietrzenia. Specyficzny zapach może utrzymywać się przez kilka dni, w tym czasie należy wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się materac.

Materac jest przeznaczony do leżenia i musi znajdować się na łóżku odpowiednio do niego dostosowanym. Wymiar materaca należy dobrać odpowiednio do wewnętrznych wymiarów łóżka, w którym ma być użytkowany.

W wersji z nacięciami nacięcie w kształcie litery „V” będące w 1/3 długości materaca powinno zawsze znajdować się po stronie górnej i bliżej głowy leżącego, gdyż tylko to ułożenie umożliwia prawidłowe ułożenie materaca przy podnoszeniu podglówka łóżka. Natomiast nacięcie „I” także będące w 1/3 długości materaca jednak od strony przeciwnej przy prawidłowej orientacji materaca znajdzie się w okolicach udowej osoby śpiącej, co umożliwi regulację łóżka w tej strefie.

Niedopuszczalne jest ułożenie wyrobu bezpośrednio na podłodze czy powierzchni pozbawionej otworów ze względu na brak odpowiedniej wentylacji.

W wykonaniu podstawowym materac posiada pokrowiec z dzianiny typu Interlock w kolorze niebieskim z możliwością prania w temp. 60st. C. W przypadku pokrowca zmywalnego i paroprzepuszczalnego (kolor biały) temperatura prania wynosi 95 st.C.

Pokrowiec paroprzepuszczalny zatrzymuje po stronie zewn. płyny fizjologiczne. W przypadku zalania należy je możliwie szybko usunąć. Pozostawienie ich może powodować dodatkowe infekcje i pogorszenie zdrowia chorego. Zabrudzony pokrowiec prać i dezynfekować zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt.4.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych, należy zaprzestać używania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.

3. Przeciwwskazania do stosowania

Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

4. Przechowywanie i konserwacja

Materac należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu chroniącym przed zabrudzeniem, zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, wpływem czynników atmosferycznych oraz uszkodzeniem.

Wyrób należy przechowywać i użytkować w pomieszczeniach suchych, pozbawionych wilgoci i nadmiernej kurzu.

Procedurę prania pokrowca należy przeprowadzić zgodnie z parametrami procesu konserwacji podanymi na wszywce. Poniżej objaśnienia zastosowanych symboli:



- prać w temp. do 60 st. C



- można suszyć w suszarce bębnowej



- prać w temp. do 95 st. C



- suszenie bębnowe przy normalnych obrotach



- wszystkie rodzaje czyszczenia chemicznego niedopuszczalne



- prasować w temp. do 150 st.C



- zakaz wybielania środkami zawierającymi chlor



- zakaz prasowania



- czyścić w czterochloroetylenie lub benzynie

5. Skład surowcowy

Ze względu na możliwość nietypowych uczuleń podajemy skład surowcowy materaca:

- bawełna, poliuretan, poliester (skład tkaniny obiciowej)
- pianka poliuretanowa (skład wkładu materaca).